

Tipps und Tricks zur Stacksoftware 3.60

Stack kann nur mit Gerüstwerkstoffen durchgeführt werden. Deshalb werden nur Konstruktionen die im Frame- oder Reduziertmodus konstruiert sind, zugelassen. Was ist aber, wenn Sie mehrere Kronen Vollanatomisch konstruiert haben und diese im Stack einbringen wollen. Zum Beispiel in e.max CAD. Natürlich geht dies auch, mit einem kleinen Trick.

TIPP: Wählen Sie den reduziert Modus als Konstruktionsprogramm aus. Geben Sie e.max CAD als Werkstoff an. Beim Schritt reduzieren, gehen Sie einfach auf weiter. Es wird nichts reduziert und diese Datei lässt sich auch im Stack einbinden.



Dies geht natürlich auch mit IPS Empress oder Mark II. Gehen Sie wie beschrieben vor. Geben Sie zwingend als Material e.max CAD an. Egal ob es in Empress oder MarkII danach geschliffen werden soll.



Wichtig:

Bitte beachten Sie, das je nach Donglelösung zusätzliche Konstruktionskosten auftreten können.

Dieser Tipp ist ideal für die Unlimited Edition.